

FOCUS DAILIES

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE – ACEST PLIANT CONTINE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA ȘI SIGURANȚA PRODUSULUI. CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PASTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE. LENTILELE DE CONTACT TREBUIE ÎNTOTDEAUNA ADAPTATE DE CĂTRE UN SPECIALIST. ESTE EȘENȚIAL SĂ URMĂȚI ÎNDICĂȚIILE SPECIALISTULUI ȘI TOATE ÎNSTRUCȚIUNILE DE PE AMBALAJ PENTRU UTILIZAREA ADECVATA A LENTILELOR DE CONTACT.

LENTILE DE CONTACT CU ÎNLOCUIRE ZILNICĂ

DENUMIRE PRODUS

Focus® DAILIES® All Day Comfort

Focus® DAILIES® Progressives

Focus® DAILIES® Toric

MATERIAL ȘI MOD DE AMBALARE

Lentilele de contact moi Focus DAILIES contin 31% nelfilcon A și 69% apă. Lentilele au tentă de vizibilitate albastru-deschis pentru a facilita manevrarea; tentă de vizibilitate este dată de Cu-phthalocyanine.

Lentilele de contact **Focus DAILIES** sunt ambalate în folii de câte 5 blistere individuale conținând soluție salină izotonică, tamponată cu fosfat-acetat. Soluția salină poate conține până la 0.02% Poloxamer. Lentilele sunt sterilizate prin vapori. Utilizați lentilele numai dacă ambalajul și folia blisterului sunt intacte.

UTILIZARE

Lentilele de contact **Focus DAILIES** sunt destinate utilizării pe timpul zilei (mai puțin de 24 de ore fără a adormi cu ele pe ochi) pentru corecția optică a vederii persoanelor care nu suferă de afecțiuni oculare, având un minim de astigmatism care nu influențează vederea.

Lentilele de contact **Focus DAILIES Progressives** sunt destinate utilizării pe timpul zilei (mai puțin de 24 de ore, fără a adormi cu ele pe ochi) pentru corecția optică a vederii, inclusiv prezbiopiei, persoanelor care nu suferă de afecțiuni oculare, având un minim de astigmatism care nu influențează vederea.

Lentilele de contact **Focus DAILIES Toric** sunt destinate utilizării pe timpul zilei (mai puțin de 24 de ore fără a adormi cu ele pe ochi) pentru corecția optică a vederii persoanelor care nu suferă de afecțiuni oculare și care necesită o corecție suplimentară a astigmatismului.

Lentilele de contact **Focus DAILIES** trebuie prescrise numai pentru utilizare unică și numai cu înlocuire zilnică.

PORT RECOMANDAT ȘI MOD DE PURTARE

Lentilele de contact **Focus DAILIES** sunt destinate pentru a fi utilizate o singură dată și aruncate după fiecare utilizare. Timpul maxim de purtare pe timpul zilei trebuie stabilit de către specialist. Lentilele de contact **Focus DAILIES** nu au fost realizate pentru a fi curățate și dezinfectate. Lentilele se vor arunca după fiecare utilizare. Utilizați o lentilă nouă de fiecare dată.

NU DORMIȚI CU LENTILELE DE CONTACT PE OCHI

Lentilele de contact **Focus DAILIES** nu au fost create pentru a fi utilizate în timpul somnului. Este interzisă purtarea lor în timpul somnului.

MANEVRAREA LENTILELOR DE CONTACT

Specialistul trebuie sa va furnizeze instructiuni detaliate privind aplicarea si scoaterea lentilelor de contact.

Intotdeauna spalati-va si stergeti-va mainile inainte de a manevra lentilele. Scuturati usor blisterul inainte de a-l deschide. Desprindeti si trageti in directia inapoi folia din aluminiu a blisterului. Scoateti lentila in palma sau, daca este necesar, impingeti usor cu degetul aratator lentila afara din recipient. Asigurati-va ca lentila este cu partea corecta in exterior si ca este cea adecvata pentru ochiul respectiv. Verificati starea lentilei inainte de a o aplica pe ochi. Nu o aplicati daca este deteriorata.

Cand scoateti lentilele de contact, asigurati-va ca aveti mainile complet uscate. Clipiti complet de cateva ori apoi, in timp ce priviti in sus, impingeti usor lentila in jos spre partea alba a ochiului. Scoateti lentila prinzand-o intre degetul mare si cel aratator. Daca nu puteti indeparta lentila nu incercati sa ciupiti tesutul ochiului. Aplicati cateva picaturi de solutie lubrifianta si incercati din nou dupa cateva minute.

Nu folositi niciodata penseta, obiectele ascutite sau unghiile pentru a scoate lentilele din recipient sau de pe ochi.

CAND SA NU PURTATI LENTILELE DE CONTACT

Lentilele de contact nu trebuie purtate in anumite conditii de sanatate sau de mediu. Conditii care pot impiedica sau influenta utilizarea lentilelor de contact intr-o maniera sigura cuprind:

- Alergii, inflamatii, infectii sau iritatii ale sau in jurul ochilor sau pleapei.
- Stare de sanatate slabita cum ar fi in caz de raceala severa sau gripa.
- Utilizarea unor medicamente, inclusiv cele destinate ingrijirii ochilor.
- Film lacrimal deficitar (ochi uscat).
- Medii excesiv de uscate sau cu praf care fac portul lentilelor de contact neconfortabil.
- Sporturi acvatice fara a folosi ochelari speciali de protectie.

Consultati specialistul in oricare dintre situatiile de mai sus sau in situatii similare.

IMPORTANT DE RETINUT

- Nu imprumutati nimanui lentilele dvs. de contact pentru ca, astfel se pot raspandi micro-organisme ce pot cauza probleme serioase de sanatate oculara.
- Examinati-va ochii in fiecare zi pentru a va asigura ca arata bine, ii simtiti confortabil iar vederea este clara.
- Se recomanda ca purtatorii de lentile de contact sa isi planifice vizite regulate la specialist conform indicatiilor primite.
- Nu utilizati lentilele de contact dupa data de expirare.
- In conditii de luminozitate scazuta, purtatorii de lentile colorate pot manifesta vedere neclara.
- Notati-va dioptriile corecte ale lentilei pentru fiecare ochi.
- Inainte de aplicarea lentilei, verificati ca dioptriile lentilei specificate pe ambalaj sa corespunda aceluia ochi.
- Asigurati-va ca aveti intotdeauna la dvs o pereche de lentile de contact de rezerva.
- Aveti grija cand utilizati sapunuri, lotiuni, creme, produse cosmetice sau deodorante intrucat pot determina iritatii daca ajung in contact cu lentilele.
- Aplicati lentilele pe ochi **inainte** de a va aplica machiajul si scoateti-le **inainte** de a-l indeparta.
- Evitati sa pulverizati aerosoli cum ar fi spray pentru par in apropierea ochilor in timp ce purtati lentilele de contact, intrucat pot cauza iritatii.
- Consultati specialistul in privinta purtarii lentilelor de contact in timpul desfasurarii unor activitati sportive, inclusiv inotului.

- Scoateti-va lentilele cand sunteti expusi unor vapori nocivi sau iritanti.
- Nu permiteti niciodata lentilei sa intre in contact cu apa nesterila (inclusiv apa de la robinet) deoarece se poate produce contaminarea microbiana ce poate afecta iremediabil ochiul.
- Aduceti la cunostinta angajatorul faptul ca purtati lentile de contact, mai ales daca locul dvs. de munca presupune utilizarea unui echipament de protectia a ochilor.
- Daca o lentila **Focus DAILIES** este expusa in aer liber se usuca si devine fragila. Trebuie aruncata si inlocuita cu una noua.

SITUATII POSIBILE

Desi lentilele de contact moi furnizeaza multe beneficii purtatorilor, pot aparea unele situatii si pot fi remarcate initial una sau mai multe dintre urmatoarele manifestari :

- Senzatie unui corp strain in ochi
- Lentile neconfortabile
- Inrosire a ochilor
- Sensibilitate la lumina
- Senzatie de arsuri, intepaturi, mancarimi in ochi sau lacrimare
- Reducerea acuitatii vizuale
- Perceperea unui curcubeu sau a unor halouri in jurul surselor de lumina
- Cresterea secretiilor la nivelul ochilor
- Disconfort/Durere
- Senzatie accentuata sau persistenta de uscaciune a ochilor

Ignorarea acestor simptome poate genera complicatii mai serioase.

CE ESTE DE FACUT IN CAZ CA APARE O PROBLEMA

Daca se manifesta vreunul dintre simptomele mentionate mai sus :

- **SCOATETI IMEDIAT LENTILA / LENTILELE**
- Examinati-va ochiul in oglinda pentru a constata daca remarcati ceva neobisnuit.
- Daca disconfortul sau problema dispar, aplicati o lentila noua.
- Daca simptomele mentionate mai sus persista dupa aplicarea unei/unor noi lentile scoateti lentila/lentilele IMEDIAT si contactati specialistul. Poate fi vorba despre una dintre urmatoarele afectiuni : infectie, ulcer cornean, vascularizatie corneana, irita. Aceste simptome se pot agrava accelerat si pot duce la pierderea permanenta a vederii. Reactiile mai putin serioase cum ar fi : eroziuni, colorare epiteliata si conjunctivita bacteriana trebuie tratate corespunzator pentru a se evita complicatiile.
- Daca o lentila se rupe pe ochi, veti resimti o senzatie de disconfort. Nu intrati in panica, intrucat este imposibil ca lentila de contact sau o parte din ea sa ajunga in spatele ochiului. Inlaturati bucatile cu grija exact cum ati proceda pentru scoaterea lentilelor in mod normal. Daca bucatile de lentila nu par a putea fi inlaturate cu usurinta, nu agresati tesutul ocular in mod excesiv. Clatiti cu solutie salina. Daca acest lucru nu ajuta, contactati specialistul pentru asistenta. Specialistul poate gasi cu usurinta lentilele folosind fluoresceina.
- Manifestarea sindromului de ochi uscat in mod ocazional poate fi inlaturata clipind de cateva ori sau folosind picaturi lubrifiante. Daca senzatia de uscaciune persista, consultati specialistul.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Riscul unei posibile probleme poate fi redus recunoscand semnele si urmand indicatiile din cadrul sectiunii « Ce este de facut in cazul in care apare o problema ». Utilizarea lentilelor de contact poate creste riscul unei infectii oculare.

Fumatul creste riscul producerii keratitei ulceroase pentru purtatorii de lentile de contact.

Producator :
CIBA Vision Corporation,
Duluth, Georgia 30097, USA

CE
0086

Reprezentant in Europa:
CIBA Vision GmbH
63868 Grosswallstadt, Germania

Distribuitor:
OPTIMED SRL
Str.Lunga nr.9, 500035 Brasov, Romania

Abrevieri pentru specificatiile lentilelor

| | |
|-----|-------------------|
| DIA | Diametru |
| CT | Grosime la centru |

Acest pliant a fost realizat exclusiv pentru piata din Romania si reflecta practicile curente de prescriptie in cadrul acesteia. Practicile de prescriptie in cadrul altor piete poate varia.

Lentilele sunt supuse perioadei de valabilitate

Data emiterii: Februarie 2009
© CIBA VISION, A Novartis Company 2009

