

# SOLO CARE AQUA

**PREZENTUL PROSPECT CONTINE INFORMATII IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA PRODUSULUI. VA RUGAM CITITI CU ATENTIE SI RETINETI. INGRIJIREA INCORECTA A LENTILELOR DE CONTACT POATE CAUZA OCHIULUI PROBLEME SERIOASE.**

**SOLOCARE AQUA este o solutie dezinfectanta total intr-un singur flacon** pentru curatarea, clatirea, pastrarea, deproteinizarea si lubrifierea tuturor tipurilor de lentile de contact moi.

## DESCRIERE

Solutie izotonica, apoasa, anti-microbiana/antibacteriana\* care contine polyhexanide 0.0001 % (ingredient activ si conservant), Hydrolock (dexpantenol si sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407, disodium edetate.

<b>STERILE</b>	<b>A</b>	Procesat prin tehnica aseptica
----------------	----------	--------------------------------

Nu contine clorhexadina si tiomersal.

Aceasta solutie si recipinetul antibacterian Microblock™ (care contine argint) ofera tot ceea ce aveti nevoie pentru o intretinere corecta si completa.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pentru a va asigura de dezinfectarea adecvata a lentilelor dvs., trebuie sa urmati intocmai instructiunile.

- intotdeauna spalati-va mainile si stergeti-le cu un prosop curat inainte de a manevra lentilele
- Incepeti intotdeauna cu cu acelasi ochi pentru a evita confuzia!
- deschideti recipinetul
  - scoateti lentila si asezati-o in palma
  - aplicati cel putin trei picaturi de **SOLOCARE AQUA** pe fiecare lentila
  - frecati usor lentila prin miscari circulare timp de cel putin 10 secunde
  - clatiti lentila temeinic cu **SOLOCARE AQUA** frecand-o intre degetul mare si aratator timp de cel putin 10 secunde
  - asezati lentila in recipient si umpleti cu solutie proaspata **SOLOCARE AQUA** pana la semn
  - insurubati capacul

Repetati procedura cu cealalta lentila

- LASATI LENTILELE IN SOLUTIE CEL PUTIN 5 MINUTE
- acum lentilele dvs. sunt curate si dezinfectate si pot fi aplicate direct pe ochi
- pentru confort sporit, clatiti lentilele cu **SOLOCARE AQUA** inainte de aplicare
- aruncati solutia din recipient, clatiti-l cu solutie **SOLOCARE AQUA** si inchideti-l pana la urmatoarea utilizare

- daca au fost pastrate in **SOLOCARE AQUA** pentru mai mult de 30 de zile, inainte de purtare, trebuie sa aruncati solutia din recipient si sa repetati procesul de curatare apoi dezinfectati lentilele in **SOLOCARE AQUA** cel putin 5 minute inainte de aplicare

### **CONTRAINDICATII** (motive pentru a nu utiliza solutia)

- nu utilizati solutia in cazul in care sunteti sensibil la oricare dintre ingrediente sau daca sunteti alergic la argint sau alte metale
- nu utilizati niciodata **SOLOCARE AQUA** pentru dezinfectare prin fierbere

### **PRECAUTII**

- nu folositi solutia dupa data expirarii
- verificati daca sigiliul flaconului este intact inainte de prima folosire. Daca este rupt nu-l folositi!
- inchideti flaconul dupa utilizare
- la 3 luni dupa desigilare aruncati orice solutie ramasa in flacon
- nu atingeti picuratorul flaconului de alte suprafete, deoarece acestea ar putea contamina solutia
- inlocuiti recipientul odata cu fiecare flacon nou **SOLOCARE AQUA**
- pastrati sub 25°C
- consultati oftalmologul/optometristul inainte de a schimba solutia cu un alt tip de solutie

### **AVERTISMENTE**

- intotdeauna utilizati **SOLOCARE AQUA** proaspata – niciodata nu refolositi solutia din recipientul de pastrare
- nu transferati **NICIODATA SOLOCARE AQUA** in alt recipient
- **NICIODATA NU** diluati sau amestecati **SOLOCARE AQUA** cu alte solutii deoarece acestea pot distruge performantele ei
- **Nu permiteti niciodata lentilelor sa intre in contact cu apa nesterila ( incluzand apa de la robinet) deoarece poate provoca contaminarea microbiana care poate conduce la aparitia unor afectiuni permanente ale ochiului**
- UTIZATI INTOTDEAUNA NUMAI COMPONENTELE SISTEMULUI SOLOCARE AQUA, INCLUSIV RECIPIENTUL. NU LE INLOCUITI CU COMPONENTELE NICI UNUI ALT SISTEM DE INTRETINERE.
- **NU LASATI LA INDEMANA COPIILOR**
- Consultati-va medicul sau specialistul in lentile de contact inainte de folosirea oricarui medicament pe durata purtarii lentilelor de contact.

### **REACTII ADVERSE**

Daca va confruntati cu senzatii persistente de disconfort sau iritatie, scoateti lentila, nu mai folositi produsul si consultati oftalmologul/optometristul.

## **RECIPIENTUL MICROBLOCK**

Recipientul antibacterian MicroBlock se poate decolora in timp; acest lucru nu afecteaza proprietatile antimicrobiene ale recipientului. Ca si in cazul altor recipienti, se recomanda inlocuirea lui cu fiecare noua achizitie de **SOLOCARE AQUA** sau dupa recomandarea specialistului.

## **FORMA DE PREZENTARE**

**SOLOCARE AQUA** este disponibila in flacoane de 60 ml, 120 ml, 250 ml si 360 ml, incluzand un recipient pentru pastrarea lentilelor.

\* activ impotriva germenilor patogeni conform ISO 14729

### **M= Producator:**

**CIBA Vision Corporation CE  
Duluth, GA 30097, USA 0086**

### **ER= Reprezentant in Uniunea Europeana:**

**CIBA Vision GmbH  
63868 Grosswallstadt, germania**

### **Distributor in Romania:**

**OPTIMED SRL  
Str. Lunga Nr. 9  
500035 Brasov  
E-mail: [office@optimed.ro](mailto:office@optimed.ro)**

